

**TA ULOTKA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU UŻYCIA I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W TRAKCIE STOSOWANIA PRODUKTU. PRZECZYTAJ UWAGA ULOTKĘ I ZACHOWAJ.**

**REVIV** JEST PŁYNEM PIELĘGNACYJNYM TYPU „WSZYSTKO W JEDNYM”, który służy do usuwania osadów białkowych, czyszczenia, spłukiwania, dezynfekcji, przechowywania i nawilżania wszystkich miękkich soczewek kontaktowych już w 5 minut.

**SKŁAD**

Izotoniczny, wodny, bezbarwny roztwór zawierający PHMB 0,0001%, Poloxamer 407, Sodium Chloride, Hypromellose, D-sorbitol, Boric acid, Borax, Edetate disodium, sterile purified water  
Produkowany w warunkach aseptycznych.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Aby zapewnić właściwą dezynfekcję soczewek, należy dokładnie stosować się do poniższych zaleceń. Zawsze przed kontaktem z soczewkami dokładnie umyj ręce .  
W celu uniknięcia pomyłek zawsze zaczynaj od tego samego oka!

5-minutowy sposób czyszczenia

- po naniesieniu na soczewkę 3 kropli płynu **REVIV** wyczyść soczewkę delikatnie pocierając ją ok. 10 sekund
- dokładnie wypłucz soczewkę płynem **REVIV**
- umieść soczewkę w komorze pojemnika i napełnij ją świeżym płynem **REVIV**

• POZOSTAW SOCZEWKI W PŁYNIE NA CO NAJMNIEJ 5 MINUT

4-godzinny sposób czyszczenia

Umieść soczewkę w komorze pojemnika do przechowywania soczewek i napełnij świeżym płynem **REVIV**,  
Pozostaw soczewki na 4 godziny

Jeżeli soczewki były przechowywane w płynie **REVIV** przez ponad 4 tygodnie, to przed ich założeniem wylej płyn z pojemnika, powtórz czyszczenie mechaniczne i zdezynfekuj soczewki pozostawiając je na przynajmniej 10 minut w płynie **REVIV**

**PRZECIWWSKAZANIA**

- Nie stosuj w przypadku alergii na którykolwiek ze składników

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Nie stosuj płynu po upływie daty ważności
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy banderola na butelce jest nienaruszona. Jeśli jest przerwana, nie używaj.
- Zakręcaj butelkę po każdym użyciu.
- Po otwarciu butelki należy wylać pozostały płyn po upływie 3 miesięcy.
- Nie dopuszczaj do kontaktu zakończenia butelki z innymi powierzchniami, gdyż może to spowodować zanieczyszczenie płynu
- Wymieniaj pojemnik na soczewki na nowy wraz z otwarciem nowej butelki **REVIV**
- Przechowuj w temperaturze pokojowej
- nie wlewaj płynu do soczewek bezpośrednio do oka.

**OSTRZEŻENIA**

- Używaj tylko świeży płyn **REVIV** – nigdy nie stosuj płynu z pojemnika na soczewki dwukrotnie
- NIGDY nie używaj wody bieżącej lub niesterylnej z soczewkami kontaktowymi, ponieważ może to spowodować zakażenie, które może doprowadzić do trwałego uszkodzenia oka
- PRZECHOWUJ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI
- Przed użyciem leków okulistycznych w trakcie noszenia soczewek kontaktowych, skonsultuj się ze swoim okulistą

NIEWŁAŚCIWA PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH USZKODZEŃ OCZU JAK RÓWNIEŻ UTRATY WZROKU

**POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA**

Płyn **REVIV** dostępny jest w opakowaniach 120ml , 360ml  
Zawierający pojemnik na soczewki.

**Producent:**

Gaia Net, Korea

Dystrybutor w Polsce:

PHU TRADEX  
Ul. Rynek 13  
88-330 Gębice