

Instrukcja używania soczewek kontaktowych

Gratulujemy wyboru miękkich soczewek kontaktowych VISION SCIENCE. Ta instrukcja ma na celu pomóc w bezpiecznym używaniu soczewek kontaktowych. Jeżeli Pan/Pani mają wątpliwości co do mocy soczewek lub ich używania skonsultuj się z lekarzem specjalistą.

Zakładanie soczewek:

- umyj i wysusz ręce przed kontaktem z soczewkami
- Wyjmij soczewki z opakowania
- ostrożnie otworzyć blister z soczewkami
- umieścić soczewkę na palcu wskazującym
- Sprawdzić czy soczewka jest czysta i na właściwej stronie
- przytrzymaj lewą ręką górną i dolną powiekę za pomocą palca wskazującego i środkowego
- patrząc na wprost w lustro powoli i z uwaga umieść soczewkę na oku
- zamknij oko i ruchem okrężnym wymasuj powiekę pozwoli to wycentrować soczewkę na oku

Ściąganie soczewek:

- umyj i wysusz ręce przed kontaktem z soczewkami
- spójrz w górę i przytrzymaj dolną powiekę
- palcem wskazującym przesun soczewkę do wewnątrz oka
- przytrzymaj i delikatnie wyjmij soczewkę

Pielęgnacja Soczewek:

Przed użyciem i zaraz po ściągnięciu soczewki muszą być umieszczone w pudełku z płynem do soczewek kontaktowych. Ściągając soczewki zawsze umieszczaj je w pojemniku na soczewki z świeżym płynem do soczewek. Gdy soczewki są nie używane dłużej niż tydzień konieczna jest zmiana płynu dezynfekującego.

Ważne wskazówki:

- nie dopuścić do kontaktu z soczewkami lakieru do włosów oraz innych spray-ów
- nie wolno pożyczać soczewek innym osobą
- nie zaleca się noszenia soczewek podczas pływania
- użytkownicy soczewek zabarwionych w warunkach słabego oświetlenia mogą

NAZWA PRODUKTU:

ISENS -Kolorowe soczewki kontaktowe
NENUNE,EUROPA -bezbarwne soczewki kontaktowe
EXOTICA - ekstrawaganckie soczewki kontaktowe

MATERIAŁ I OPAKOWANIE:

ISENS -Blister (2 szt)
NENUNE,EUROPA,EXOTICA-Vials (1szt)
SKŁAD:55% Hefilcon, 45% Woda
Przechowywane są w soli fizjologicznej

DIA -średnica, BC-krzywizna bazowa
PWR -moc sferyczna

GDY POJAWI SIĘ PROBLEM

- Bezwłocznie zdejmij soczewki
- Chwilową suchość oka można złagodzić stosowaniem kropli nawilżających
- Wrazie przywarcia soczewki do oka należy zakropić oko i spróbować zdjąć soczewkę. Jeżeli się to nie uda proszę natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalistą.

WSKAZANIA:

Soczewki ISENSE,NENUNE,EUROPA, EXOTICA są przeznaczone do noszenia w trybie dziennym.

PRODUCENT:
VISION SCIENCE CO.,LTD
1092-7, Buksa-ri, Jain-myeon,
Gyeongsan-si, KOREA

PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ:
Phu Tradex
Rynek 13,88330 Gębice

**VISION
SCIENCE**
www.visionscience.pl

